



Mikrozid Sensitive servetėlės

Medicinos prietaisų dezinfekantas

Dėmesio!

Ši naudojimo instrukcija skirta profesionaliems naudotojams. Profesionalūs naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Paskirtis

Paruoštos naudoti servetėlės skirtos alkoholiui jautriems medicinos prietaisams dezinfekuoti. Tinka organiniam stiklui, ultragarsinių daviklių dezinfekcijai.

Sudėtis

100g tirpalo yra: 0,26g ketvirtinių amonio junginių, benzyl-C12-C18-alkyldimetyl, chloridų, 0,26g didecyldimethylammonium chlorido, 0,26g ketvirtinių amonio junginių, C12-C14-alkyl[(etylphenyl)metyl]dimethylamonio, chloridų.

Savybės

naikina bakterijas grybelius, B, C hepatito virusus, ŽIV, vaccinia virusus, rotavirusą.

Naudojimas

Ištraukite servetėlę iš dėžutės-dozatoriaus ir atplėškite. Viena servetėlė galima apdoroti 100 cm² lygaus paviršiaus, ekspozicijos laikas – 1 min. Dezinfekuojamas paviršius turi būti drėgnas ne mažiau kaip 1 min. Didesniems medicinos prietaisų paviršių plotams dezinfekuoti galima naudoti kelias servetėles. Panaudotą servetėlę išmesti į atliekas.

Darbų saugos nurodymai

Pateikiami saugos duomenų lape, kuris pridedamas įsigyjant preparatą.

Jei abejojate, kad preparatas gali sugadinti medicinos prietaiso paviršių išbandykite ant nedidelio paviršiaus ploto.

Saugojimas

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

Pakuotės

Plastmasės pakuotė su 200 20x20cm drėgnų servetėlių